

## Note di rilascio

---

# Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal (Portale per operatori sanitari Floodlight™ MS)

**Versione del software: 1.8.2 | Versione del documento: 15.0**

© F. Hoffmann-La Roche Ltd 2023

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione o la trasmissione totale o parziale, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o altro, è vietata senza il previo consenso scritto del proprietario del copyright.

I copyright e tutti gli altri diritti proprietari in qualsiasi software e relativa documentazione ("Software") messi a disposizione dell'utente appartengono esclusivamente a Roche o ai suoi licenziatari. Nessun titolo o proprietà del Software viene conferito all'utente. L'uso del software è soggetto al contratto di licenza con l'utente finale.

FLOODLIGHT MS è un marchio di Roche.

ANDROID, GOOGLE e il logo GOOGLE PLAY sono marchi di Google, LLC. APPLE il logo APPLE e APP STORE sono marchi di Apple Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal potrebbe contenere componenti o moduli Open Source o programmi software commerciali.

Nella misura massima consentita dalla legge, l'utente non deve decompilare e/o sottoporre a reverse engineering il software o qualsiasi sua parte.

Non utilizzare per scopi diagnostici, di monitoraggio o terapeutici o in qualsiasi altro modo per l'abituale pratica medica.



Roche Molecular Systems, Inc.  
2881 Scott Boulevard  
Santa Clara, California 95050  
United States of America

Prodotto negli Stati Uniti



09342346001

**Data di  
pubblicazione**

2024-01-02







[floodlightms.com](https://floodlightms.com)

Contattare Roche per richiedere una versione stampata di questo documento.

## Simboli utilizzati

La tabella seguente mostra i simboli utilizzati in questo Note di rilascio.

	<b>Produttore:</b> il nome e l'indirizzo del produttore dell'applicazione.
	<b>Numero di riferimento:</b> indica il numero di riferimento o di catalogo di questo manuale utente.
	<b>Consultare le istruzioni per l'uso:</b> il dispositivo include istruzioni elettroniche per l'uso (eIFU).
	<b>Avvertenze e precauzioni:</b> evidenzia le informazioni critiche per le prestazioni ottimali del sistema. Può anche indicare che potrebbero verificarsi perdite di dati o dati non validi se non si osservano le precauzioni o le istruzioni.

# Prefazione

Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal permette di:

- Visualizzare i dati raccolti dai tuoi pazienti utilizzando Floodlight™ MS Mobile Application tra una visita clinica e l'altra
- Esaminare come la sclerosi multipla influisce sulla loro funzionalità cognitiva, sulla funzionalità della mano e sull'andatura
- Migliorare la conversazione associata alle cure

## Uso previsto

Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal è destinato a visualizzare i risultati di varie valutazioni da Floodlight™ MS Mobile Application per utente finale e per diversi utenti nel tempo. L'HCP è l'unico responsabile dell'interpretazione dei risultati.

## Avvertenze e precauzioni



Leggere la spiegazione dei dati visualizzati in un grafico del paziente per capire il significato di un aumento e di una diminuzione di un valore metrico così come le etichette dell'asse Y. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Informazioni sulla cartella clinica** nel manuale utente di Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal.



Fare riferimento alla sezione **Piattaforme supportate (a pagina 7)** per assicurarvi che i requisiti hardware e software siano soddisfatti.

## Piattaforme supportate

La seguente tabella mostra le piattaforme supportate per Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal.

Piattaforme	Versione
DHP: dhp-api-gateway	dev_2206
DHP: dhp-gql-query-svc	dev_1397
DHP: dhp-patient-mgmt-svc	dev_5198
Floodlight™ MS SDK: iOS	1.8.2
Floodlight™ MS SDK Android	1.8.2
Floodlight™ MS SDK Backend	1.8.2

## Limitazioni note e soluzioni

I seguenti problemi sono identificati come problemi noti con soluzioni nella versione corrente di Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal.

### **Proprietario del Team può invitare solo gli utenti registrati nel proprio Team**

In Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal, un Proprietario del Team può invitare solo un utente registrato come Membro del team. Se hai bisogno di aggiungere un Membro del team che non è già stato registrato, contatta il tuo amministratore di sistema o Roche. per registrare prima l'utente.

### **L'immagine del codice QR non viene visualizzata nell'e-mail di benvenuto inviata a un operatore sanitario**

Se Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal invia un'e-mail di benvenuto a un operatore sanitario utilizzando un account Gmail, l'e-mail di benvenuto non visualizza l'immagine del codice QR per l'operatore sanitario. In questo caso, l'operatore sanitario può utilizzare il codice alfanumerico o l'opzione **Genera il mio codice** nel portale per generare l'immagine del codice QR per la registrazione dei pazienti.

### **Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal genera un errore quando un operatore sanitario con un numero elevato di pazienti tenta di utilizzare il formato CSV per esportare i dati di tutti i pazienti**

Quando un operatore sanitario con un numero elevato di pazienti utilizza l'opzione **Tutti i pazienti** per creare un report CSV, il portale genera un errore e non esporta alcun dato. Un operatore sanitario con un numero elevato di pazienti può evitare questo errore esportando i record per pochi pazienti specifici alla volta.



## Limitazioni note attualmente senza soluzione

Le seguenti limitazioni non sono state risolte nella versione corrente di Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal. Le soluzioni o gli espedienti per aggirare il problema saranno comunicati nelle future note di rilascio.

- L'e-mail di invito di Membro del team viene inviata nella lingua impostata per il mittente invece che nella lingua impostata per il destinatario dell'e-mail.
- Quando un account Proprietario del Team viene disattivato, i pazienti associati al neurologo appaiono ancora nell'elenco **Tutti i pazienti** e nell'elenco **Pazienti non assegnati** degli altri Membri del Team.
- In alcuni casi, se il paziente e il neurologo si trovano in fusi orari diversi, il neurologo potrebbe non essere in grado di vedere subito tutti i dati del paziente.
- Per alcune lingue, l'e-mail di adesione non mostra il logo Floodlight™ MS nell'intestazione.