

Notas de lançamento

Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal (Portal dos Profissionais de Saúde Floodlight™ MS)

Versão do software: 1.8.2 | Versão do documento: 15.0

© F. Hoffmann-La Roche Ltd 2023

Todos os direitos são reservados. A reprodução ou transmissão, total ou parcial, sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico, mecânico ou outro, é proibida sem o consentimento prévio por escrito do proprietário dos direitos de autor.

Os direitos de autor e todos os outros direitos de propriedade relativos a qualquer software e documentação relacionada («Software») disponibilizados ao utilizador são exclusivos da Roche ou dos seus licenciantes. Nenhum título ou propriedade do Software é concedido ao utilizador. A utilização do Software está sujeita ao contrato de licença do utilizador final.

FLOODLIGHT MS é uma marca comercial da Roche.

ANDROID, GOOGLE e o logótipo GOOGLE PLAY são marcas comerciais da Google, LLC. APPLE, o logótipo APPLE e APP STORE são marcas comerciais da Apple Inc. Todos os outros nomes de produtos e marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

O Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal pode conter componentes ou módulos que são programas de software Open Source ou comerciais.

Até à extensão máxima permitida por lei, o utilizador não deve descompilar e/ou inverter a engenharia do software ou de qualquer parte do mesmo.

Não se destina a fins de diagnóstico, monitorização ou terapêuticos ou de qualquer outra forma para a prática médica regular.



Roche Molecular Systems, Inc.

2881 Scott Boulevard

Santa Clara, California 95050

United States of America

Fabricado nos EUA



09342346001

**Data de
publicação**

2024-01-02







floodlightms.com

Entre em contacto com a Roche para solicitar uma versão impressa deste documento.

Símbolos utilizados

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados neste Notas de lançamento.

	Fabricante do produto: o nome e o endereço do fabricante da aplicação.
	Número de referência: indica a Referência ou o Número de catálogo deste Manual do utilizador.
	Consultar as instruções de utilização: o dispositivo inclui instruções de utilização eletrónicas.
	Avisos e precauções: realça as informações que são fundamentais para um desempenho ideal do sistema. Pode também indicar a possibilidade de perda de dados ou de dados inválidos, se as precauções ou instruções não forem respeitadas.

Prefácio

Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal permite-lhe:

- Visualizar dados recolhidos pelos seus doentes com Floodlight™ MS Mobile Application entre consultas
- Analisar de que forma a EM afeta a cognição, destreza manual e marcha do doente
- Melhorar a conversa em torno dos seus cuidados

Utilização prevista

O Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal destina-se a apresentar os resultados de várias avaliações da aplicação Floodlight™ MS Mobile Application pelo utilizador final e para vários utilizadores ao longo do tempo. O profissional de saúde é o único responsável pela interpretação dos resultados.

Avisos e precauções



Leia a explicação para os dados apresentados no gráfico de um doente para entender o significado de um aumento e de uma diminuição de um valor métrico, bem como as etiquetas do eixo Y. Para obter mais informações, consulte a secção **Rever um registo do paciente** no Manual do utilizador Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal.



Consulte a secção **Plataformas compatíveis** (na página 7) para garantir que os requisitos de hardware e software são cumpridos.

Plataformas compatíveis

A tabela seguinte indica as plataformas compatíveis com Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal.

Plataformas	Versão
DHP: dhp-api-gateway	dev_2206
DHP: dhp-gql-query-svc	dev_1397
DHP: dhp-patient-mgmt-svc	dev_5198
Floodlight™ MS SDK: iOS	1.8.2
Floodlight™ MS SDK Android	1.8.2
Floodlight™ MS SDK Backend	1.8.2

Limitações e soluções alternativas conhecidas

Os seguintes problemas são identificados como problemas conhecidos com soluções alternativas na versão atual de Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal.

O Titular da equipa só pode convidar utilizadores registados para a sua Equipa

Em Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal, um Titular da equipa só pode convidar um utilizador registado como Membro da equipa. Se pretender adicionar um Membro da equipa que ainda não esteja registado, contacte o administrador do seu sistema ou a Roche, para registar primeiro o utilizador.

A imagem do código QR não é apresentada no e-mail de boas-vindas enviado a um profissional de saúde

Se o Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal utilizar uma conta Gmail para enviar um e-mail de boas-vindas a um profissional de saúde, o e-mail de boas-vindas não apresenta a imagem do código QR ao profissional de saúde. Neste caso, o profissional de saúde pode utilizar o código alfanumérico ou a opção **Gerar o meu código** no portal para gerar a imagem do código QR para inscrever doentes.

Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal gera um erro quando um profissional de saúde, com um grande número de doentes, tenta usar o formato CSV para exportar dados de todos os doentes

Quando um profissional de saúde com um grande número de doentes utiliza a opção **Todos os doentes** para criar um relatório CSV, o portal gera um erro e não exporta nenhum dado. Um profissional de saúde, com um número maior de doentes, pode evitar este erro, exportando os registos de alguns doentes específicos de cada vez.

Limitações conhecidas sem soluções alternativas atuais

As seguintes limitações estão por resolver na versão atual de Floodlight™ MS Healthcare Professional's Portal. Em futuras notas de lançamento serão comunicadas as resoluções ou soluções alternativas.

- O e-mail de convite do Membro da equipa é enviado no idioma configurado para o remetente em vez do idioma configurado para o destinatário deste e-mail.
- Quando uma conta do Titular da equipa é desativada, os doentes associados ao profissional de saúde ainda aparecem na lista **Todos os doentes** e na lista **Doentes por atribuir** dos outros Membros da equipa.
- Em alguns casos, se o doente e o profissional de saúde estiverem localizados em zonas com fusos horários diferentes, o profissional de saúde pode não ser capaz de ver todos os dados do doente imediatamente.
- Em alguns idiomas, o e-mail de adesão não apresenta o logótipo do Floodlight™ MS no cabeçalho.